

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig –
sie wird Ihnen helfen, die Augentropfen richtig anzuwenden.

OmniMed® Hya HD **extra** mit Allantoin

Befeuchtende & schützende Augentropfen

(Natriumhyaluronat 0,20% mit Allantoin)

Benetzende Augentropfen zur Befeuchtung und zum Schutz der Augenoberfläche mit Hyaluronsäure & Allantoin.

Zur Linderung bei Trockenheitsgefühl, Reizung und leichten Irritationen.

Unterstützt aufgrund seiner Zusammensetzung die Zellregeneration.

Sterile Lösung.

Wohltuend, gut verträglich und langanhaltend. Für harte und weiche Kontaktlinsen geeignet.

Was ist OmniMed® Hya HD extra?

OmniMed® Hya HD extra ist ein steriles und leichtviskoses Benetzungsmittel im Mehrdosenbehältnis.

OmniMed® Hya HD extra enthält Hyaluronsäure und Allantoin und dient der verbesserten und langanhaltenden Befeuchtung der Augenoberfläche. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschlichen Auges und im Tränenfilm vorkommt und dadurch besonders gut verträglich ist. Sie zeichnet sich durch ein hohes Wasserbindungsvermögen aus, haftet gut auf der Augenoberfläche (mucoadhäsive Eigenschaften) und ist viskoelastisch. Somit befeuchtet, benetzt und schützt OmniMed® Hya HD extra die Oberfläche des Auges und sorgt für einen gleichmäßigen, stabilen und lang haftenden Feuchtigkeitssfilm auf der Augenoberfläche. Allantoin ist ein pflanzlicher Wirkstoff, der beispielsweise aus der Pflanze Beinwell gewonnen wird. Allantoin wirkt auf physikalischem Wege beruhigend und pflegend und trägt in Kombination mit der Hyaluronsäure zur Bewahrung der Feuchtigkeit bei.

OmniMed® Hya HD extra eignet sich sehr gut zur Linderung bei Trockenheitsgefühl, Reizung und leichten Irritationen. Es unterstützt als wohltuender Feuchtigkeitsspender die Zellregeneration.

Polyhexanid, das in OmniMed® Hya HD extra enthalten ist, ist ein sanftes Konservierungsmittel, das, dank seiner antimikrobiellen Eigenschaften, sehr wirksam vor Kontamination der Lösung schützt und gleichzeitig sehr gut verträglich ist.

OmniMed® Hya HD extra ist zur Benetzung von Kontaktlinsen gut geeignet. Dadurch wird der Tragekomfort der Kontaktlinsen deutlich verbessert.

Zusammensetzung

Natriumhyaluronat (0,20%), Allantoin, Polyhexanid (PHMB, 0,00015%), Natriumedetat (EDTA), Natriumchlorid, isotonischer Phosphatpuffer, gereinigtes Wasser.

OmniMed® Hya HD extra kann bei folgenden Indikationen verwendet werden:

- Zur Linderung bei Trockenheitsgefühl und bei leichter, nicht als pathologisch einzustufender Reizung durch umgebungsbedingte Befindlichkeitsstörungen des Auges wie z. B. Brennen, Ermüdung, langes Arbeiten vor dem Bildschirm oder Tragen von Kontaktlinsen.
- Unterstützt als wohltuender Feuchtigkeitsspender die Zellregeneration.

Wann sollte man OmniMed® Hya HD extra nicht anwenden?

- Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Für wen ist OmniMed® Hya HD extra geeignet?

- Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen.
- Schwangere, stillende Frauen und Kleinkinder sollten vor der Anwendung von OmniMed® Hya HD extra Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von OmniMed® Hya HD extra auftreten?

- Nach der Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe (Schleiersehen) eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschinen bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach dem Tropfen können vorübergehende Symptome, z. B. leichtes Brennen der Augen auftreten.

Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Flasche auf ihre Unversehrtheit prüfen, um sicherzustellen, dass der Inhalt keimfrei ist.
- Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn die Flüssigkeit trüb ist oder eine Färbung aufweist.

- Achten Sie darauf, dass das Auge nicht mit der Flasche in Berührung kommt, um Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden.
- Die Öffnung des Mehrdosenbehältnisses darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden.
- Bei Nebenwirkungen jeglicher Art fachärztlichen Rat einholen.
- Nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion anwenden.
- Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder anderen Produkten, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da OmniMed® Hya HD extra deren Wirkung verändern kann.
- Dasselbe Mehrdosenbehältnis darf nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- OmniMed® Hya HD extra ist nicht als Aufbewahrungsflüssigkeit von Kontaktlinsen geeignet.
- OmniMed® Hya HD extra sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Präparat darf nach Ablauf des Verfallsdatums, das auf dem Etikett und der Faltschachtel angegeben ist, nicht mehr verwendet werden.

Wie wird OmniMed® Hya HD extra angewendet?

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

Schritt 1:

Hände sorgfältig waschen und abtrocknen.

Zum Öffnen den Schraubverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Brechen des Sicherheitsverschlusses drehen. Bitte entfernen Sie den Sicherheitsring nach dem erstmaligen Öffnen der Flasche.

Schritt 2:

Flasche mit der Öffnung nach unten halten und pro Auge je einen bis zwei Tropfen in den Bindehautsack einträufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente Flüssigkeitsschicht auf der Augenoberfläche.

Schritt 3:

Verschließen Sie die Flasche nach der Anwendung mit der Verschlusskappe.

Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie einen bis zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie diese in Ihre Augen einsetzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben.

OmniMed® Hya HD extra kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen getropft werden.

Wie oft und wie lange sollte man OmniMed® Hya HD extra anwenden?

Wenden Sie OmniMed® Hya HD extra nach Bedarf oder nach Anweisung des Augenarztes an.

OmniMed® Hya HD extra ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen. OmniMed® Hya HD extra sollte **nach** den anderen Produkten appliziert werden.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augentropfen in 15 ml und 2 x 15 ml Mehrdosenbehältnissen.

Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei 5 °C bis 25 °C lagern.

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf der Flasche sowie auf der Faltschachtel.





Nach Anbruch der Flasche ist OmniMed® Hya HD extra 90 Tage verwendbar.




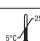
OmniMed® Hya HD extra kann im Hausmüll entsorgt werden.

Stand der Gebrauchsinformation: Mai 2019

 **Hersteller:**
OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim
Deutschland
Tel.: +49 89 84 07 92-30
Fax: +49 89 84 07 92-40
www.omnivision.de
E-Mail: info@omnivision.de

 0344

	Hersteller
	Von Sonnenlicht fernhalten Von Wärme fernhalten
	Sterilisiert durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken
	Gebrauchsanweisung beachten

	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Fertigungslosnummer, Charge
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung

